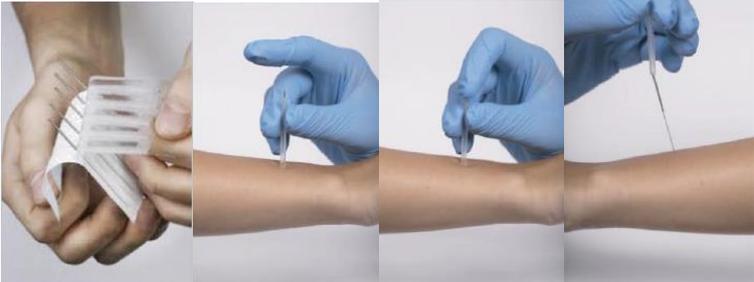


Nombre del producto	Aguja de acupuntura (AGP)
Fabricante	AguPunt SL
Referencia	Ver anexo I
Certificado	ES19/86786

Norma de referencia	Directiva 93/42/EEC producto sanitario
Modelo	Ver Anexo I
Material	Aguja de acero calidad AISI304H <ul style="list-style-type: none"> - C (0,08%) - Si (0,44%) - Mn (1,26%) - P (0,31%) - S (0,05%) - Ni (8,10%) - Cr (18,14%) - N (0,04%) - CO (0,21%) Mango de cobre o baño plata.

Expiración	3 años desde la fabricación
Condiciones de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> ○ Conservar en lugar seco ○ Temperatura máxima de almacenamiento 50°C
Descripción del producto	Instrumentos estériles, largos, delgados y puntiagudos que se utiliza para estimular los nervios periféricos.
Instrucciones de uso	Utilice guantes de un solo uso. Abra el envase unitario separado de dos lengüetas localizadas en la parte superior del envase unitario. Doble el blíster hacia el exterior para permitir la extracción del conjunto aguja + fiador con código de colores (en caso de disponer de él) + guía (si dispone de ella). <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserción de la aguja: Introducir la aguja en el emplazamiento elegido a criterio del terapeuta y en función de la técnica de elección. 2. Una vez insertada la aguja, esta puede ser manipulada en función del tipo de tratamiento a seguir. 3. Extracción de la aguja: En los tratamientos de fisioterapia, una vez terminado el tratamiento e inmediatamente después de retirar la aguja, debe practicarse una hemostasia en la zona de inserción.

	
<p>Precauciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es un producto de un solo uso que debe destruirse después de su uso, de acuerdo con los protocolos locales. No reutilizar, su reutilización puede causar infecciones o contaminación cruzada. • Es un producto estéril. La esterilización se lleva a cabo con óxido de etileno. • Prohibido el uso si hay un defecto en el embalaje. En caso de daños en el embalaje estéril, desecha la aguja. • Prohibido si un paciente tiene un trastorno hemorrágico o toma anticoagulantes. • Evite venas primarias, ojos, área genital, nariz interna, labios. Las áreas con infecciones de la piel, consulte de antemano con un dermatólogo. • En caso de sangrado, desinfecte el área y presione hasta el final del sangrado. • Durante el tratamiento, el paciente puede notar dolor leve o agudo, área adormecida. En algunos casos puede causar mareos o pérdida de conciencia. Si ocurre el tratamiento debe suspenderse. • En caso de rotura y permanencia de la aguja insertada, debe ir a un hospital para extraerla. • Este producto no necesita instalación, pero debe ser usado por profesionales cualificados con experiencia. • Si la aguja de acupuntura se utiliza repetidas veces puede causar infección iatrogénica. • Utilizar siempre guantes de un solo uso, para evitar la contaminación de la aguja y de la zona de inserción. • La inserción de la aguja, el tratamiento y la extracción pueden ser levemente dolorosos y pueden causar adormecimiento de la zona.

<p>Fabricado por</p>	<p>Agupunt SL</p>
<p>Embalaje</p>	<p>Caja con 100 o 200 agujas dependiendo del modelo. (ver anexo I)</p>
<p>Foto del producto</p>	

Certificado por	SGS House Noorderlaan
País	Bélgica
Número Organismo Notificado	CE 1639 

Anexo I

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	CANTIDAD / QTY.
A1000	AGP PREMIUM 0,18x9	200
A1000B	AGP PREMIUM 0,20x13	200
A1001B	AGP PREMIUM 0,20x25	200
A1004A	AGP PREMIUM 0,20x50	200
A1001	AGP PREMIUM 0,25x13	200
A1002	AGP PREMIUM 0,25x25	200
A1003	AGP PREMIUM 0,25x40	200
A1004	AGP PREMIUM 0,25x50	200
A1006B	AGP PREMIUM 0,30x25	200
A1003B	AGP PREMIUM 0,30x40	200
A1004B	AGP PREMIUM 0,30x50	200
A1037B	AGP PREMIUM 0,16x25	200
A1037A	AGP PREMIUM 0,18x25	200
A1037BB	AGP PREMIUM 0,20x15	200
A1037BD	AGP PREMIUM 0,20x25	200
A1011	AGP PREMIUM 0,25x100	200
A1037	AGP PREMIUM 0,25x13	200
A1038	AGP PREMIUM 0,25x25	200
A1037BF	AGP PREMIUM 0,25x30	200
A1042	AGP PREMIUM 0,25x40	200
A1039	AGP PREMIUM 0,30x25	200
A1040	AGP PREMIUM 0,30x40	200
A1042B	AGP PREMIUM 0,30x50	200
A1010	AGP PREMIUM 0,30x75	200
A1041	AGP PREMIUM 0,32x40	200
A1007D	AGP PREMIUM 0,16x25	200
A1007A	AGP PREMIUM 0,18x25	200
A1007B	AGP PREMIUM 0,18x9	200
A1007C	AGP PREMIUM 0,20x25	200
A1007	AGP PREMIUM 0,25x13	200
A1008	AGP PREMIUM 0,25x25	200
A1008C	AGP PREMIUM 0,25x40	200

A1008B	AGP PREMIUM 0,30x25	200
A1009	AGP PREMIUM 0,30x40	200
A1010A	AGP PREMIUM 0,30x75	200
A1007E	AGP PREMIUM 0,32x13	200
A1008A	AGP PREMIUM 0,32x25	200
A1009B	AGP PREMIUM 0,32x40	200
A1009C	AGP PREMIUM 0.30x50	200
A1009D	AGP PREMIUM 0.32x50	200
A1028	AGP STANDARD 0,25x13	200
A1030B	AGP STANDARD 0,30x40	200
A1029	AGP STANDARD 0.25x25	200
A1030	AGP STANDARD 0.25x40	200
A1030A	AGP STANDARD 0.25x50	200
A1030C	AGP STANDARD 0.30X50	200
A1030D	AGP STANDARD 0.32X50	200
A1031	AGP STANDARD 0.25x13	200
A1032	AGP STANDARD 0.25x25	200
A1033	AGP STANDARD 0.25x40	200
A1033C	AGP STANDARD 0.30x25	200
A1033B	AGP STANDARD 0.30x40	200
A1046	AGP COREANA / KOREAN 0,17x7	100
A1046C	AGP COREANA / KOREAN 0,18x30	100
A1046D	AGP COREANA / KOREAN 0,20x30	100
A1046B	AGP COREANA / KOREAN 0,25X15	100
A1047	AGP COREANA / KOREAN 0,25x30	100
A1049B	AGP COREANA / KOREAN 0,25x40	100
A1051A	AGP COREANA / KOREAN 0,25x50	100
A1048	AGP COREANA / KOREAN 0,30x15	100
A1049	AGP COREANA / KOREAN 0,30x30	100
A1050	AGP COREANA / KOREAN 0,30x40	100
A1051	AGP COREANA / KOREAN 0,30x50	100